

13 FEB. 2014

SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

KF08

Cuscino in fibra cava siliconata con impuntura centrale

Codice CND: Y033303

N. Reg. Repertorio Naz. dispositivi medici: vedi retro


Destinazione d'uso:

Prevenzione delle piaghe da decubito.

Classificazione CE: I

COD. ISO 03.33.03.003

Caratteristiche Tecniche:

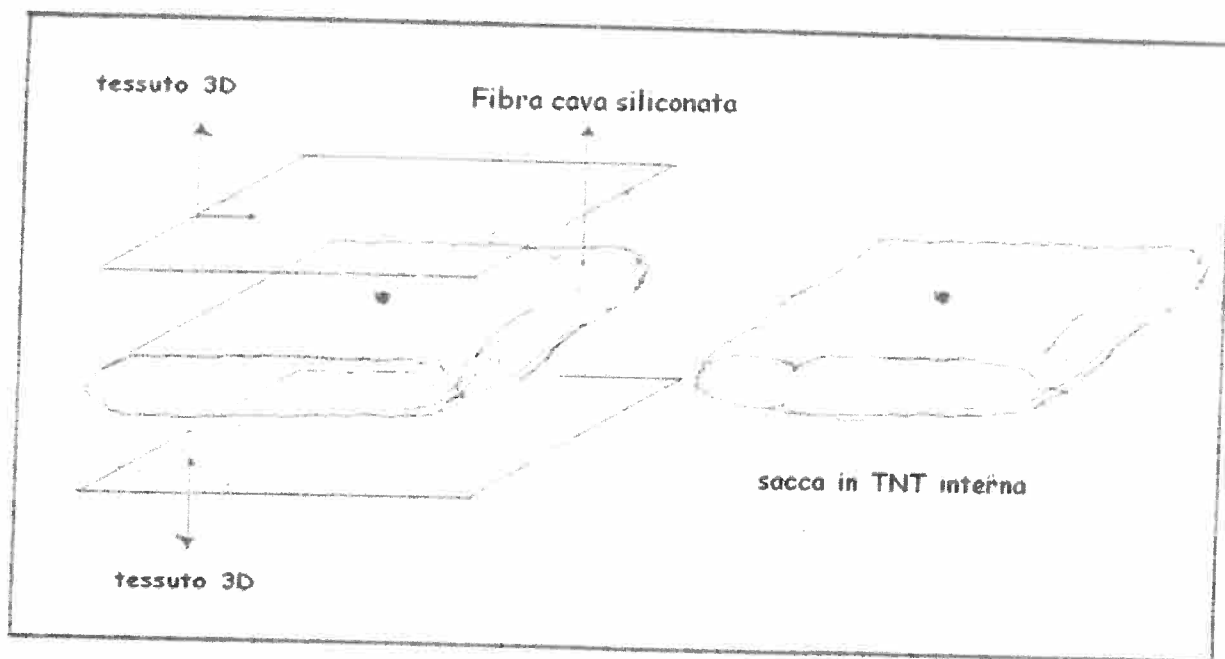

Il cuscino KF08 è in fibra cava siliconata con impuntura centrale e fodero di rivestimento amovibile mediante zip posta su un lato.

L'interno, una sacca in TNT, contiene fibra 100% di poliestere 14 denari, con le seguenti caratteristiche:

- cava, a più canali, per una idonea resilienza e traspirabilità;
- coniugata con fili di silicone per permettere un rapido ritorno alle sollecitazioni del peso corporeo;
- siliconata per evitare l'ammassamento e mantenere le caratteristiche di elasticità;
- in nessuna fase di lavorazione viene a contatto con le proteine del lattice di gomma naturale.

Il cuscino ha impuntura centrale per evitare spostamenti della fibra. La quantità di fibra cava coniugata siliconata è tale da consentire una buona risposta al carico.

Il fodero è realizzato in tessuto 3D, 100% cotone.

Modalità d'impiego:

Posizionare il dispositivo sulla seduta con la cerniera rivolta verso lo schienale.

Manutenzione e pulizia:

Si consiglia il lavaggio del fodero a mano con saponi neutri temperatura massima 40° C, o in lavatrice programma delicati.

La sacca in TNT contenente la fibra cava siliconata è lavabile in acqua ad una temperatura massima di 40° C con saponi neutri. Sciacquare con abbondante acqua; non centrifugare né strizzare; non utilizzare mai solventi; asciugare

VASSILLI S.r.l.
IL PRESIDENTE
Berto Vassilli

KF08

Cuscino in fibra cava siliconata con impuntura centrale

lontano da fonti di calore; non stirare; non candeggiare.



Avvertenze e precauzioni:

- Si consiglia l'uso ad un solo utente.
- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il cuscino KF08 deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

Modalità di smaltimento:

Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse.

Codice e misure

	larghezza	profondità	altezza	peso	n° repertorio
KF084040	40 cm.	40 cm.	9 cm.	450 gr.	999369/R
KF084545	45 cm.	45 cm.	9 cm.	550 gr.	947939/R

VASSILLI S.r.l.
IL PRESIDENTE
Berto Vassilli