

KA45S

Imbracatura sollevapersona per amputati

Codice CND: Y123621

N. Reg. Repertorio Naz. dispositivi medici: vedi retro

Destinazione d'uso:


Dispositivo per spostamenti di pazienti disabili.

Classificazione CE: I

Caratteristiche Tecniche:

OFFICINA ORTOPEDICA
FERRERO S.r.l.

12 FEB 2014

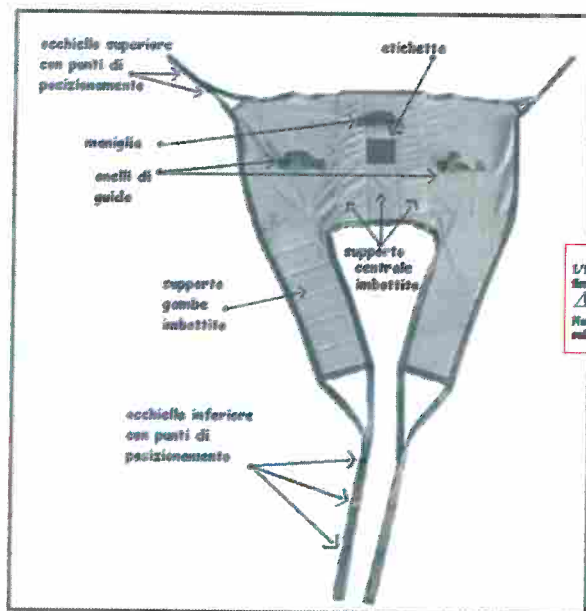

COMBINAZIONI
L'imbracatura può essere utilizzata con sollevatori sia fissi che mobili.
Non superare il peso massimo dichiarato sull'imbottitura.

L'imbracatura KA45S viene utilizzata per il sollevamento di pazienti con amputazioni mono e bilaterali degli arti inferiori. E' importante che l'utilizzatore abbia un buon controllo del collo.

E' realizzata con tessuto denominato Slipstex, 100% poliestere, ad elevata resistenza, alto scivolamento, antistrappo, traspirante.

Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbracatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento.

La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità.

Sono previsti due anelli guida per assicurare un posizionamento corretto del supporto gambe.

Le cuciture vengono eseguite utilizzando il filo in poliestere ad alta resistenza.

Una morbida imbottitura fornisce un gradevole supporto sia a livello della schiena che a livello cosce.

Portata max. Kg. 250

E' testata da un istituto accreditato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 10535.

Modalità d'impiego:

Adatta ad essere utilizzata con sollevatori sia fissi che mobili.

Manutenzione e pulizia:

Lavabile in acqua a una temperatura massima di 60° con saponi o detersivi neutri.

Non stirare.

KA45S

Imbracatura sollevapersone per amputati



Avvertenze e precauzioni:

- Prima dell'utilizzo assicurarsi che il dispositivo non sia danneggiato: il tessuto, la cinghia, le cuciture e gli occhielli di sospensione devono essere integri
- Ispezionare periodicamente per verificare eventuali segni di danno, usura o potenziale cedimento almeno ogni 6 mesi soprattutto se la pulizia avviene con maggiore frequenza rispetto al normale
- Accertarsi che gli occhielli dell'imbracatura siano agganciati adeguatamente al bilanciante
- Conservare e utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Non superare la portata massima dichiarata

Modalità di smaltimento:

Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse.

Codice e misure disponibili

	Taglia	A	B	C	D	n° repertorio
KA45S-S	S	113 cm.	98 cm.	58 cm.	24 cm.	476111/R
KA45S-M	M	117 cm.	106 cm.	62 cm.	32 cm.	704091/R
KA45S-L	L	127 cm.	114 cm.	66 cm.	40 cm.	704092/R
KA45S-XL	XL	135 cm.	124 cm.	70 cm.	48 cm.	704093/R

