

id 9



Capelli S.r.l.
Via dell'Artigianato, 205
37056 Salizzole - VR
Tel. 0456900365 - 0456901693
Fax 0456909696

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

KA46

Imbracatura sollevapersona per toilette

Codice CND: Y123621

N. Reg. Repertorio Naz. dispositivi medici: vedi retro

Destinazione d'uso:


Dispositivo per spostamenti di pazienti disabili.

Classificazione CE: I

Caratteristiche Tecniche:

OFFICINA ORTOPEDICA
FERRERO S.r.l.

12 FEB 2014

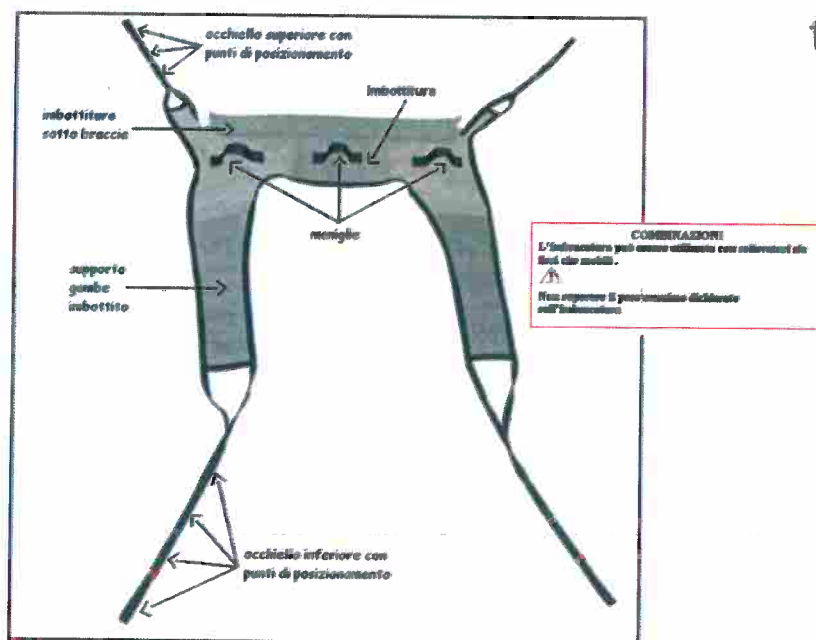

L'imbracatura KA46 viene utilizzata per il sollevamento, trasferimento e operazioni igieniche per la toilette. E' realizzata con tessuto a rete denominato Strongtex, 100% poliestere, affidabile in ogni situazione anche a contatto con l'acqua, antistrappo e altamente traspirante.

Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l'imbracatura e forma, ad ogni estremità, un occhio con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento.

La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell'imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità.

Le cuciture vengono eseguite utilizzando il filo in poliestere ad alta resistenza.

Una morbida imbottitura fornisce un gradevole supporto sotto le braccia.

Portata max. Kg. 250

E' testata da un istituto accreditato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 10535.

Modalità d'impiego:

Adatta ad essere utilizzata con sollevatori sia fissi che mobili.

Manutenzione e pulizia:

Lavabile in acqua a una temperatura massima di 60° con saponi o detersivi neutri.

Non stirare.



KA46

Imbracatura sollevapersone per toilette

Avvertenze e precauzioni:

- Prima dell'utilizzo assicurarsi che il dispositivo non sia danneggiato: il tessuto, la cinghia, le cuciture e gli occhielli di sospensione devono essere integri
- Ispezionare periodicamente per verificare eventuali segni di danno, usura o potenziale cedimento almeno ogni 6 mesi soprattutto se la pulizia avviene con maggiore frequenza rispetto al normale
- Accertarsi che gli occhielli dell'imbracatura siano agganciati adeguatamente al bilanciere
- Conservare e utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Non superare la portata massima dichiarata

Modalità di smaltimento:

Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse.

Codice e misure disponibili

| | taglia | A | B | C | D | n° repertorio |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| KA46-S | S | 85 cm. | 88 cm. | 25 cm. | 42 cm. | 476113/R |
| KA46-M | M | 85 cm. | 96 cm. | 25 cm. | 50 cm. | 704094/R |
| KA46-L | L | 89 cm. | 104 cm. | 29 cm. | 58 cm. | 704095/R |
| KA46-XL | XL | 95 cm. | 112 cm. | 32 cm. | 66 cm. | 704096/R |

