



Scheda Tecnica Prodotto

Nome della società: Cook Italia Srl	Tel: +39 02 69 68 28 53 Fax: +39 02 69 43 02 52
Indirizzo della società: Via Galileo Galilei, 32 20834, Nova Milanese (MB) Italia	E-mail: gare@cookmedical.com
Vigilanza contatto: Anna Bjerg Jessen	Tel: +45 56 86 85 93 Email: anna.jessen@cookmedical.com

PRODOTTO:

Set con catetere per cricotirotomia d'emergenza Patil

CODICE PRODOTTO:

C-DTJV-6.0-6.0-PATIL

C-DTJV-9.0-6.0-PATIL

DIMENSIONI**C-DTJV-6.0-6.0-PATIL**

Catetere – French: 6,0, lunghezza: 6 cm


C-DTJV-9.0-6.0-PATIL

Catetere – French: 9,0, lunghezza: 6 cm

200412

COOK ITALIA S.r.l.

Immagine

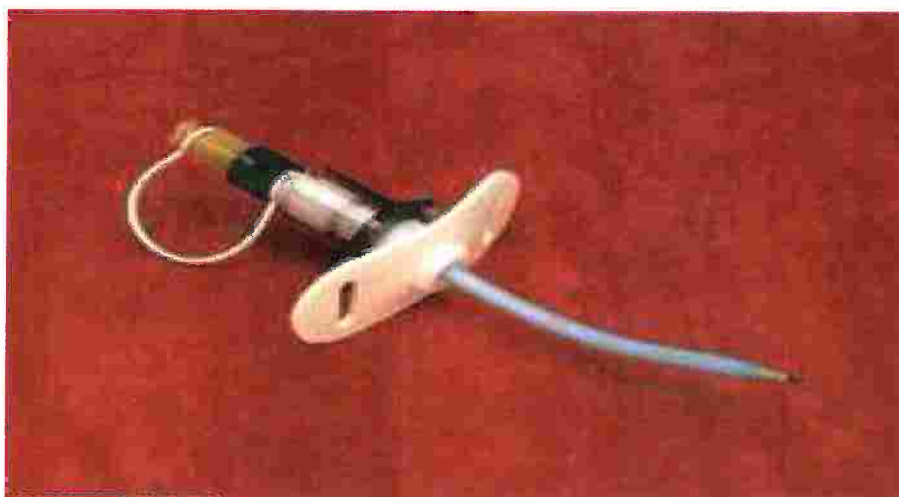

COMPONENTI:

Catetere per cricotirotomia
Ago introduttore
Bisturi
Siringa da 5 cc
Fascetta di cotone

DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE TECNICHE:

Siringa da 5 cc e raccordo Luer Lock
Catetere per cricotirotomia realizzato in FEP rinforzato, raccordo luer-lock, connettore prossimale da 15 mm, adattatore anatomico per fissaggio alla cute. Ago introduttore coassiale preassemblato costituito da un ago in acciaio inox da 19 G e cannula in polietilene.

DESTINAZIONE D'USO:

Il set con catetere per cricotirotomia d'emergenza Patil è previsto per l'accesso di emergenza alle vie respiratorie nei casi in cui non sia possibile eseguire l'intubazione endotracheale tradizionale.

CONTROINDICAZIONI:

Nessuna nota

PRECAUZIONI:

- I pazienti con lesioni a carico delle vie respiratorie possono avere anche gravi lesioni a livello della colonna vertebrale. Ogniqualvolta possibile, la colonna vertebrale cervicale deve pertanto essere immobilizzata prima dell'inizio della procedura. È necessario prestare sempre la dovuta attenzione al fine di evitare ulteriori lesioni della colonna vertebrale.

20 04 12
COOK ITALIA s.r.l.
[Handwritten signature]

- Ogniqualvolta possibile e opportuno nel contesto della procedura, adottare una tecnica asettica e praticare un'anestesia locale.
- Il presente dispositivo non è specificamente progettato per applicazioni pediatriche. L'idoneità del dispositivo all'uso su pazienti pediatrici deve essere determinata dal medico curante.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO RACCOMANDATE:

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Evitare l'esposizione prolungata alla luce. Dopo l'estrazione dalla confezione, esaminare il prodotto per accertarsi che non abbia subito danni.

Materiali di composizione in contatto diretto con il paziente	FEP Polietilene Acciaio inossidabile
--	--

Marchio CE	Sì
Classe	IIa
Numero ente notificato	0088
Produttore	Cook Incorporated
Codice CND e descrizione	R9099 DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ALTRI

Monouso	Sì
Sterilizzazione	Sì
Indirizzo di sterilizzazione	Cook Incorporated Ellettsville, Indiana 47429 USA
Metodo sterilizzazione	ETO
Periodo di conservazione	36 mesi
Origine biologica	No
Presenza di lattice	No
Biocompatibilità	Sì
Confezione	Singola


 20 04 12
 COOK ITALIA S.r.l.