



Scheda Tecnica Prodotto

Nome della società: Cook Italia Srl	Tel: +39 02 69 68 28 53 Fax: +39 02 69 43 02 52
Indirizzo della società: Via Galileo Galilei, 32 20834, Nova Milanese (MB) Italia	E-mail: gare@cookmedical.com
Vigilanza contatto: Anna Bjerg Jessen	Tel: +45 56 86 85 93 Email: anna.jessen@cookmedical.com

PRODOTTO:

Introduttore per intubazione Frova

CODICE PRODOTTO:

C-CAE-14.0-70-FII-WCE


DIMENSIONI**C-CAE-14.0-70-FII-WCE**

- Catetere – French: 14,0, lunghezza – 70 cm

Adattatore Rapi-Fit - connettore da 15 mm

Adattatore Rapi-Fit - connettore Luer Lock

Immagine

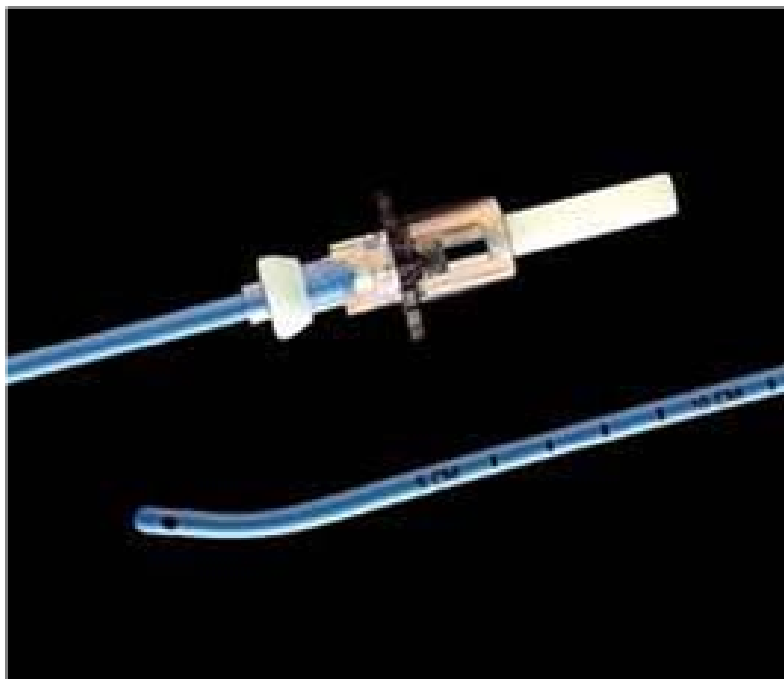

COMPONENTI :

Catetere per intubazione

Mandrino

Adattatori

DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE TECNICHE:

Catetere del diametro di 14 French (5 mm) con lume interno di 3 mm; lunghezza complessiva di 70 cm.

Punta distale chiusa pre-curvata atraumatica con raggio di curvatura di 2 cm. Fori laterali distali per un eventuale somministrazione d'ossigeno, tramite l'adattatore per ossigenazione.

La punta angolata agevola il corretto posizionamento oltre le corde vocali.

Mandrino in acciaio inox della lunghezza di 55 cm con impugnatura in plastica anatomica.

Fornito di 2 adattatori Rapi-Fit che consentono la connessione ad un dispositivo di ossigenazione.

DESTINAZIONE D'USO:

L'introduttore per intubazione Frova è stato studiato per il posizionamento di un tubo endobronchiale a lume singolo il cui diametro interno è 6 mm o superiore

CONTROINDICAZIONI:

Non utilizzare se non è possibile visualizzare l'epiglottide durante la laringoscopia, p.e. laringoscopia classificata di IV grado Cormack & Lehane.

PRECAUZIONI:

- Considerare sempre la possibilità di reazioni allergiche.
- Non per uso intravascolare.
- Non far avanzare il catetere oltre la carena.
- Fare attenzione a non ferire l'epiglottide e la glottide, a non provocare la perforazione del seno piriforme, della trachea o dei bronchi.
- Fare attenzione alle dimensioni corrette del catetere rispetto al tubo endotracheale.
- Prestare attenzione durante l'estrazione del catetere.
- L'introduttore per intubazione non è destinato all'uso con tubi endobronchiali o endotracheali a doppio lume.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO RACCOMANDATE:

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Evitare l'esposizione prolungata alla luce. Dopo l'estrazione dalla confezione, esaminare il prodotto per accertarsi che non abbia subito danni.

Materiali di composizione in contatto diretto con il paziente	Poliuretano radiopaco Acciaio inossidabile
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Marchio CE	Sì
Classe	I
Numero ente notificato	0088
Produttore	William Cook Europe
Codice CND e descrizione	R0199 DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE

Monouso	Sì
Sterilizzazione	Sì
Indirizzo di sterilizzazione	Sandet 6, DK-4632 Bjæverskov, Denmark
Metodo sterilizzazione	ETO
Periodo di conservazione	Fino a 36 mesi
Origine biologica	No
Presenza di lattice	No
Biocompatibilità	Sì
Confezione	Singola