

# TENSOPLAST

## BENDA ELASTICA ADESIVA

<b>DESCRIZIONE</b>	Benda elastica adesiva MONOUSO porosa in tessuto di alta qualità cotone/rayon per compressione e sostegno. Eccezionale elasticità del tessuto, massa adesiva porosa, bordi soffici e non sfilacciabili.
<b>SUPPORTO</b>	Ordito: cotone Consistenza: =17 fili/cm (benda a riposo); Trama: rayon Consistenza: = 78 fili/cm (benda a riposo) Spessore: 1050-1100 µm Peso del supporto: 140-170 g/m <sup>2</sup> Permeabilità ai raggi X: 100%
<b>MASSA ADESIVA</b>	Ossido di zinco 24/26%; Resine; Caucciù Peso: 120-150 g/m <sup>2</sup> La massa adesiva è spalmata in modo poroso.
<b>STERILIZZABILITA'</b>	Il prodotto è fornito non sterile e non è sterilizzabile.
<b>RITORNO ELASTICO</b>	massimo 80%
<b>ESTENSIBILITA'</b>	= 115-145%
<b>RESISTENZA ALLO SVOLGIMENTO</b>	250 gf/cm (valore massimo)
<b>ADESIONE</b>	150-400 gf/cm <b>(SU PIASTRA ACCIAIO)</b>
<b>VANTAGGI</b>	-Facile da utilizzare -Tessuto di qualità superiore, altamente estensibile, conformabile, assorbente, termoregolato -Massa adesiva porosa spalmata omogeneamente che permette una corretta traspirazione cutanea, riducendo il rischio di fenomeni di macerazione -Linea centrale gialla che assicura una maggiore precisione nell'applicazione -Bordi soffici con cimosa non ricoperti dall'adesivo
<b>INDICAZIONI</b>	- Svolge una funzione di supporto nel trattamento di patologie muscolari, tendinee ed articolari (contusioni, distorsioni di grado 0-1, lussazioni, lesioni capsulo-legamentose) -Trattamento elastocompressivo di patologie vascolari dell'arto inferiore (bendaggio fisso) -Fissaggio di medicazioni
<b>AVVERTENZE</b>	Questo prodotto contiene lattice naturale, e potrebbe provocare reazioni allergiche in soggetti predisposti
<b>VALIDITA' CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Il prodotto va conservato ad una temperatura non superiore ai 25°C. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni. Il prodotto correttamente conservato mantiene elasticità ed adesività inalterate per il periodo di validità.
<b>PRESENTAZIONE</b>	Unità d'uso: benda singola sigillata in involucro di plastica, in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice a barre. Unità di vendita: confezione da 12 bende in scatole individuali. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i. – Dispositivo medico – Classe I
<b>CODICE CND</b>	M0304010302
<b>NUMERO DI REGISTRAZIONE</b>	22154/R

# TENSOPLAST

## BENDA ELASTICA ADESIVA

Continua/2

<b>FABBRICANTE</b>	BSN medical (Pty) Ltd, Pinetown, 3610, South Africa
<b>EC-REP</b>	BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania
<b>DISTRIBUITO DA</b>	BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20864, Agrate Brianza (MB).
<b>SITO PRODUTTIVO</b>	Made in SA

<b>CODICI ESTESI</b>	<b>CODICI BREVI</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)</b>	<b>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
71545-00000-00	71545-00	5cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende
71546-00000-00	71546-00	7,5cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende
71547-00000-00	71547-00	10cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende