



**SCHEMA TECNICA**  
**BD E-Z SCRUB™ con Disinfettante**  
**Monouso**

**DESCRIZIONE**

**BD E-Z SCRUB™ con Disinfettante** è un sistema efficace per una perfetta disinfezione e detersione preoperatoria. Il sistema spugna spazzolino, insieme al netta-unghie, assicura la completa pulizia di unghie, mani e braccia.

La confezione singola monouso evita il rischio di contaminazioni incrociate.

Il sistema si presenta pronto all'uso, è pratico da utilizzare, evita lo spreco di disinfettante e di soluzione detergente e non pone problemi di risterilizzazione.

**CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO**

Il sistema **BD E-Z SCRUB™ con Disinfettante** consiste in uno spazzolino con setole di plastica, attaccato ad una spugna.

**Componenti:**

- spazzolino di plastica (polietilene radiostabile)
- spugna (poliestere)
- colla sintetica a caldo che tiene attaccati la spugna allo spazzolino netta-unghie (polistirene)

**BD E-Z SCRUB™ con Disinfettante è monouso**

**BD E-Z SCRUB™ con Disinfettante** è individualmente confezionato in un involucro di materiale impermeabile, e riporta stampate le indicazioni relative al prodotto. Sia la confezione da 30 pezzi (dispenser), che il singolo blister presentano informazioni complementari riguardanti l'esatta descrizione dell'antisettico.

**Confezionamento:**

Cartone da 300 pezzi (10 confezioni/dispenser da 30 pezzi)

## **GAMMA**

- **Codice 377477**  
**BD E-Z SCRUB™ SOLUZIONE CLOREXIDINA D-DIGLUCONATO**

- CODICE COLORE: Arancio
- COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA:

Contenuto della confezione	18ml
Clorhexidine Gluconate 4%	4%
Altri componenti	
Propylene glycol distearate	3,5%
Nonoxinol	5,0%
Lanolin	5,0%
Lauramide DEA	3,50%
Hydrochloric	0.01%
Sodium Hydroxide	0.01%
Red dye FD&C 40	0,01%
Acqua distillata	Q.B. a 100ml

FORMA FISICA DEL PREPARATO:	Sistema spugna con netta-unghie imbevuto con soluzione antisettica
PROPRIETÀ CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI CHE NE GIUSTIFICANO L'IMPIEGO:	Riconosciuta proprietà antisettica e battericida della Clorexidina D- diglucunato
DURATA PRODOTTO:	2 Anni dalla data di produzione e comunque non oltre il periodo indicato sulla confezione
CONFEZIONAMENTO SINGOLO:	Blister in Nylon/Poliestere Termoformato
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E DI SMALTIMENTO:	Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dal calore. Prodotto Monouso: Usare una sola volta. Conservare fuori della portata dei bambini. Non disperdere il prodotto nell'ambiente dopo l'uso.
MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO	Il prodotto può essere usato una sola volta – Per uso esterno – Detergere accuratamente per almeno 5 minuti con BD E-Z SCRUB™ CLOREXIDINA D-DIGLUCONATO le mani e gli avambracci insistendo su unghie e spazi fra le dita.
AVVERTENZE	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi, mucose, zone sensibili della pelle e cute lesa.

Segue BD E-Z Scrub™ CON DISINFETTANTE

- Tempo di eliminazione dei microrganismi con BD E-Z SCRUB™ CLOREXIDINA D-DIGLUCONATO:

Staphylococcus aureus	Concentrazione tal quale Concentrazione 1:10	1 minuto 1 minuto
Pseudomonas Aeruginosa	Concentrazione tal quale Concentrazione 1:10	1 minuto 1 minuto
Escherichia coli	Concentrazione tal quale Concentrazione 1:10	1 minuto 1 minuto
Candida albicans	Concentrazione tal quale Concentrazione 1:10	1 minuto 1 minuto

● **Codice 371167**

**BD E-Z SCRUB™ SOLUZIONE PARACLOROMETAXILENOLO (PCMX)**

- CODICE COLORE: Azzurro
- COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA:

Contenuto della confezione	16ml
Parachlorometaxilenol (PCMX)	3,20%
Altri componenti	
Ammonium nonoxynol sulfate	8,0%
Lanolin	2,0%
Ammonium sulfo succinate	8,0%
Cellulose	1,0%
Hydrochloridric acid	0,50%
Aroma	0,30%
Acqua distillata	Q.B. a 100ml

FORMA FISICA DEL PREPARATO:	Sistema spugna con netta-unghie imbevuto con soluzione antisettica
PROPRIETÀ CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI CHE NE GIUSTIFICANO L'IMPIEGO:	Riconosciuta proprietà antisettica e battericida del Parachlorometaxilenolo
DURATA PRODOTTO:	2 Anni dalla data di produzione e comunque non oltre il periodo indicato sulla confezione
CONFEZIONAMENTO SINGOLO:	Blister in Nylon/Poliestere Termoformato
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E DI SMALTIMENTO:	Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dal calore. Prodotto Monouso: Usare una sola volta. Conservare fuori della portata dei bambini. Non disperdere il prodotto nell'ambiente dopo l'uso.
MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO:	Il prodotto può essere usato una sola volta – Per uso esterno – Detergere accuratamente per almeno 5 minuti con BD E-Z SCRUB™ PCMX le mani e gli avambracci insistendo su unghie e spazi fra le dita.
AVVERTENZE:	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi, mucose, zone sensibili della pelle e cute lesa.

Segue BD E-Z Scrub™ CON DISINFETTANTE

Tempo di eliminazione dei microrganismi con BD E-Z SCRUB™ PCMX:

Staphylococcus aureus	Concentrazione tal quale Concentrazione 1:10	1 minuto 1 minuto
Pseudomonas Aeruginosa	Concentrazione tal quale Concentrazione 1:10	1 minuto 5 minuti
Escherichia coli	Concentrazione tal quale Concentrazione 1:10	1 minuto 5 minuti
Candida albicans	Concentrazione tal quale Concentrazione 1:10	1 minuto 5 minuti

Le etichette riportano le specifiche dettate dalla vigente normativa

L'intero ciclo produttivo dei prodotti Becton Dickinson è realizzato nel rispetto delle procedure GMP (Good Manufacturing Practice) e delle più rigorose specifiche internazionali tra cui FDA (Food and Drug Administration), ed è sottoposto al controllo ed all'approvazione degli organi preposti.

**Stabilimento di produzione**      Becton Dickinson Infusion Therapy Systems inc.-Sandy, Utah, USA  
Becton Dickinson - Franklin Lakes, New Jersey, USA

**Certificazione FDA dello Stabilimento:** FDA N. 3711-10-1998

**Certificazioni ISO**

**SANDY:** Ente Notificato BSI – N. Certificato FM 71665 – EN ISO 13485:2003

Certificato Ambientale: Ente Certificatore DNV – N. Certificato CERT-01001-2005-AE-HOU-ANAB - ISO 14001:1996

**FRANKLIN LAKES:** Ente Notificato NSAI – Certificato MD 19.2305 – I.S. EN ISO 13485:2003 e I.S. EN ISO 9001:2000

**Registrazione presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico:**

cod. 377477 – N. di Registrazione 19139, rilasciato in data 25/1/2006

cod. 371167 - N. di Registrazione 19110, rilasciato in data 25/10/2005

**Destinazione d'uso**

Lavaggio pre-chirurgico delle mani  
Antisettico per pelle integra, uso esterno.