

# FIXOMULL STRETCH

## FASCIA AUTOADESIVA IPOALLERGENICA PER IL FISSAGGIO SU AMPIA SUPERFICIE

<b>DESCRIZIONE</b>	Fascia autoadesiva per il fissaggio di cateteri e di medicazioni specie su area estesa.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Supporto in poliestere non tessuto bianco Massa adesiva in poliacrilato ipoallergenico. Peso del supporto: 30-60 g/mq. Peso del adesivo: 45+/- 10 g/mq. <b>La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	Flessibile, conformabile, facile da maneggiare, radiotrasparente, sterilizzabile, permeabile all'aria ed al vapore acqueo (>3400g/m2). Ipoallergenico, molto ben tollerato anche da pazienti con pelle sensibile. Fissaggio sicuro, buon potere adesivo iniziale e permanente. Chimicamente inerte alla gomma ed alla plastica. Estensibile trasversalmente si adatta bene anche ai profili tortuosi del corpo. Rimozione indolore anche in presenza di peli, non lascia residui. Il fissaggio su area estesa della medicazione sui 4 lati previene i rischi di contaminazione.
<b>INDICAZIONI</b>	Fissaggio di medicazioni su area estesa, particolarmente per il fissaggio di medicazioni su articolazioni e su parti del corpo soggette a movimenti frequenti o con profili tortuosi. Fissaggio di tubi, sonde, cateteri, strumenti di misura, strumenti vari.
<b>STERILIZZABILITA'</b>	Il prodotto non è sterile ma è sterilizzabile utilizzando ossido di etilene o raggi gamma.
<b>ATOSSICITA'</b>	Tutti i materiali utilizzati nella preparazione delle materie prime, dei coloranti e degli inchiostri impressi direttamente sulle parti che vengono a contatto con i tessuti del corpo sono atossici.
<b>ELASTICITA'</b>	17-36%
<b>ADESIVITA'</b>	1,2-2.2 N/cm
<b>CARICO MINIMO DI ROTTURA</b>	Longitudinalmente: 125 +/- 40 N/50mm Trasversalmente: 40 +/- 15 N/mm
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Breve termine (da uno a più giorni)
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	<b>Unità d'uso e di vendita: rotolo in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice barra.</b> L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara.
<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 5 anni.
<b>CODICE CND</b>	M050201 Cerotto estensibile per fissaggio area estesa
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

Continua

# FIXOMULL STRETCH

## FASCIA AUTOADESIVA IPOALLERGENICA PER IL FISSAGGIO SU AMPIA SUPERFICIE

Continuazione/2

<b>CODICI</b>		<b>MISURA</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARIA (unità di vendita)</b>	<b>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
<b>VECCHIO</b>	<b>NUOVO</b>				
02036-00000-07	02036-00000-08	5cm x 10m	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
02037-00000-07	02037-00000-08	10cm x 10m	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
02038-00000-07	02038-00000-08	15cm x 10m	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
02039-00000-07	02039-00000-08	20cm x 10m	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
02040-00000-07	02040-00000-08	30cm x 10m	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli

# COVERMED

## MEDICAZIONE ADESIVA IN TNT CON ADESIVO IPOALLERGENICO

<b>DESCRIZIONE</b>	Medicazione adesiva in TNT color bianco, con tampone a bassa aderenza ed adesivo ipoallergenico
<b>COMPOSIZIONE</b>	Supporto morbido e conformabile in tessuto non tessuto estensibile trasversalmente. Massa adesiva acrilica ipoallergenica. Peso dell'adesivo: 40 - 50 g/mq. Compressa ad alto assorbimento laminata con un film di polietilene. <b>La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico.</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	Molto ben tollerato dalla pelle, flessibile e conformabile. Aderisce bene anche sui contorni corporei. Permeabile all'aria ed al vapore acqueo. La compressa, assorbente, non si attacca alla ferita. Mantiene pulita la ferita e la protegge da agenti esterni in tutte le fasi della guarigione. Indicato per pelli sensibili e per parti del corpo ricoperte da peli. Confezionati igienicamente e singolarmente. È consigliabile cambiare la medicazione almeno una volta al giorno.
<b>STERILIZZAZIONE</b>	Il prodotto non è fornito sterile. Può essere sterilizzato sia con il metodo all'ossido di etilene sia con il metodo irradiazioni raggi gamma; Si consiglia di utilizzare a breve termine il prodotto dopo la sterilizzazione.
<b>INDICAZIONI</b>	Per la protezione delle piccole ferite.
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Breve termine
<b>ADESIVITA'</b>	1,00 – 4,80 N/cm
<b>CARICO ALLA ROTTURA</b>	40 ± 15 N/50mm trasversalmente 125 ± 40 N/50mm longitudinalmente
<b>ESTENSIBILITA'</b>	120 ± 30% trasversalmente, 38% longitudinalmente
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	<b>Unità d'uso e di vendita Covermed striscia:</b> <b>medicazione in striscia in scatola di cartoncino individuale, utilizzabile come dispenser, con marchio CE e codice a barre.</b> <b>Unità d'uso e di vendita Covermed strips:</b> <b>medicazione singola in involucro peel-open in carta siliconata.</b> <b>Unità di vendita: confezione da 100 medicazioni in scatola di cartoncino, con marchio CE e codice barra.</b> L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara.
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
<b>CODICE CND</b>	M050102 Cerotti medicati
<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto ed a una temperatura inferiore a 25°C. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni.
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

Continua

# COVERMED

## MEDICAZIONE ADESIVA IN TNT CON ADESIVO IPOALLERGENICO

Continua/2

Covermed striscia

<b>CODICI</b>	<b>MISURA</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARIA (unità di vendita)</b>	<b>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
72152-00000-00	6cm x 5m	1 rotolo	1 rotolo	40 rotoli
72153-00000-00	8cm x 5m	1 rotolo	1 rotolo	30 rotoli

Covermed medicazione pronta all'uso

<b>CODICI</b>	<b>MISURA</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARIA (unità di vendita)</b>	<b>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
72218-00000-00	19mm x 72mm	1 scatola da 100 cerotti	1 scatola	48 scatole
72218-00001-00	38mm x 63mm	1 scatola da 100 cerotti	1 scatola	36 scatole