

# TENSOPLAST SKIN TRACTION KIT

## KIT PER TRAZIONE CUTANEA

<b>DESCRIZIONE</b>	<p>I Kit per trazione cutanea TENSOPLAST SKIN TRACTION KIT costituiscono un sistema di supporto efficiente ed affidabile per applicare all'arto, in modo non invasivo, i sistemi di trazione più idonei.</p> <p>Sono disponibili in due versioni, adesiva e non adesiva, e in due misure, adulto e bambino.</p>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE:</b>  <b>1. STRISCIA ADESIVA:</b>	<p><u><b>Kit adesivo</b></u>  <b>Il kit consiste di:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. una striscia di tessuto non tessuto, spalmata con adesivo acrilico sensibile alla pressione per consentire la massima adesione. L'adesivo non è irritante e non crea fenomeni di sensibilizzazione.</b></li> <li><b>2. Una striscia protettiva in schiuma di polietilene a cellule aperte</b></li> <li><b>3. Una corda di trazione</b></li> <li><b>4. Una piastra di distensione</b></li> <li><b>5. Una benda</b></li> </ol> <p><b>COMPOSIZIONE</b></p> <p>Tessuto non tessuto (32% poliestere/68% viscosa)          spalmato con adesivo acrilico, e con carta protettiva siliconata bianca.          Peso: 123-137 g/m<sup>2</sup>          Spessore: 0,5-0,8mm          Resistenza allo strappo: 28-42 N/cm          Adesione su piastra d'acciaio: minimo 150mN/mm          Massa adesiva: 30-40 g/m<sup>2</sup>          Permeabilità al vapore acqueo: 500 g/m<sup>2</sup>/24ore minimo          Dimensioni: Adulto: 75mm(± 2) x 1,8m                            Bambino: 50mm (± 2)x 1,3m</p>
<b>2. SCHIUMA DI PROTEZIONE:</b>	<p>In 100% polietilene a celle aperte          Densità: 19-20,5kg/m minimo          Resistenza tessile: 70 KPa min          Estensibilità: 150% minimo          Resistenza allo strappo: 0,26 N/cm minimo          Dimensioni: Adulto: 90x500x10mm                            Bambino: 60x380x10mm</p>

continua

# TENSOPLAST SKIN TRACTION KIT

## KIT PER TRAZIONE CUTANEA

continuazione/2

<b>3. CORDA DI TRAZIONE:</b>	<p>In 100% poliestere intrecciato bianco naturale  Lunghezza: 180(± 2) cm  Diametro: 4(± 1) cm  Forza di rottura: 200 kg/m min</p>
<b>4. PIASTRA DI DISTENSIONE:</b>	<p>In polistirene (acrilonitrile butadiene stirene) da forte impatto, con tre fori centrali per permettere un passaggio uniforme della corda.  Dimensioni: Adulto: 75x75x2,4mm, peso 14g  Bambino: 50x50x2,6mm, peso 6g</p>
<b>5. BENDA DI FISSAGGIO:</b>	<p>Benda universale di supporto (TENSOLASTIC) in 69% cotone, 30% poliammide e 1% elastane con bordi in cimosia.  Estendibilità: 100-120%  Densità: 72-78 g/m<sup>2</sup>  Resilienza: 50% massimo  Dimensioni: Adulto: 8cmx7,5m  Bambino: 6cmx 5m</p>
<b>1. SCHIUMA DI FISSAGGIO:</b>	<p><u><b>Kit non adesivo</b></u>  <b><i>Il kit consiste delle stesse componenti del kit adesivo (2,3,4,5), eccetto:</i></b>  <b><i>1. una striscia di tessuto non tessuto, spalmata con adesivo acrilico, a cui è attaccata, per tutta la lunghezza, una striscia di schiuma di polietilene a celle chiuse e legami incrociati, che permette un fissaggio leggermente coesivo e anti-scivolo.</i></b>  In 100% polietilene a celle chiuse, e legami incrociati  Densità: 25-45kg/m  Resistenza tessile: &gt;180 kPa  Estensibilità: &gt;120%  Resistenza allo strappo: &gt;6,5 N/cm  Assorbimento acqueo: &lt;0,005 g/m<sup>3</sup>/ dopo 24ore  Dimensioni: Adulto: 1800x75x3,5mm  Bambino: 1300x50x3,5mm</p>

continua

# TENSOPLAST SKIN TRACTION KIT

## KIT PER TRAZIONE CUTANEA

continuazione/3

<b>INDICAZIONI</b>	Trazione con pesi, ed altri specifici tipi di trazione quali: Splint di Thomas, Trazione di Russell e trazione per lesioni del disco. I kit non adesivi sono indicati per pazienti con pelle fragile (anziani o bambini) o con nota intolleranza ad adesivi.
<b>PRECAUZIONI PER L'USO</b>	Durante l'applicazione della striscia in tessuto non tessuto, evitare grinze o pieghe che potrebbero dar luogo a punti di pressione. Verificare giornalmente che non sussistano eventuali manifestazioni di irritazione della pelle <b>Il prodotto non contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico.</b>
<b>CONTROINDICAZIONI</b>	Nessuna
<b>BIOCOMPATIBILITA' ED ATOSSICITA'</b>	Tutti i materiali utilizzati nella preparazione delle materie prime sono atossici.
<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Il prodotto va conservato all'asciutto ad una temperatura non superiore ai 25°C. La durata del prodotto correttamente conservato è di 3 anni.
<b>CONFEZIONE</b>	Unità d'uso: Singolo kit confezionato in busta di polipropilene, poi in scatola individuale, con foglietto illustrativo d'uso. Unità di vendita: confezione da 12 singoli kit L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto di Classe I conforme alla direttiva 93/42/CEE
<b>CODICE CND</b>	M030503
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto BSN medical Ltd, Brierfiel -Inghilterra e distribuito da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

<b>CODICI</b>	<b>NUOVI CODICI</b>	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)</b>	<b>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
66000456	71544-00000-00	Adesivo	Adulto	1 kit in scatola di cartoncino	12 kit	12 kit
66000457	71544-00000-00	Adesivo	Bambino	1 kit in scatola di cartoncino	12 kit	12 kit
66000458	71555-00000-00	Non adesivo	Adulto	1 kit in scatola di cartoncino	12 kit	12 kit
66000459	71556-00000-00	Non adesivo	Bambino	1 kit in scatola di cartoncino	12 kit	12 kit