

# PLATRIX

## BENDA GESSATA A PRESA RAPIDA

<b>DESCRIZIONE E INDICAZIONI D'USO</b>	Benda gessata a presa rapida, cremosa e resistente, per il confezionamento di apparecchi gessati. Adatta a tutti i tipi di intervento in ortopedia e traumatologia.
<b>COMPOSIZIONE DEL SUPPORTO</b>	Cotone puro sbiancato Peso supporto: 23g/m <sup>2</sup> <u>Conto fili</u> : 17/ cm <sup>2</sup>
<b>COMPOSIZIONE DELLA MASSA GESSATA</b>	Gesso di origine naturale (>85%) e leganti cellulosici e vinilici per permettere alla massa di aderire al supporto
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<u>Peso complessivo</u> : 500g/m <sup>2</sup> ±10% <u>Tempo di presa</u> : 150±15 secondi (iniziale) <u>Tempo di imbibizione</u> : 4 secondi a 25±2°C <u>Resistenza</u> : a 30 minuti (16 strati)- 15N/cm minimo Resistenza a secco a 12h: 14.29 Kg <u>Perdita gesso</u> : 9±4% <u>Umidità</u> : trattenuta 38% massimo residua (10 ore a 37°C) 11% massimo Permeabilità ai raggi X: 40% <b>Il prodotto non contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico.</b>
<b>AVVERTENZE PER L'USO</b>	Per evitare danni esotermici al paziente, non aggiungere alcun altro ingrediente all'acqua di immersione per accelerare il tempo di presa, e non immergere le bende in acqua con temperatura superiore a 25°C. Attendere almeno 30 minuti dopo aver confezionato il gesso prima di mobilizzare il paziente.
<b>COMPATIBILITÀ</b>	Il prodotto correttamente utilizzato non viene a contatto con prodotti chimici o farmaceutici.
<b>BIOCOMPATIBILITÀ ED ATOSSICITÀ</b>	Tutti i materiali utilizzati nella preparazione delle materie prime sono atossici.
<b>STERILIZZABILITÀ</b>	Il prodotto è fornito non sterile. Il prodotto non è sterilizzabile.
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	<u>Bende</u> : Unità d'uso: due bende singole in involucro termosaldato di polipropilene a tenuta di umidità. Unità di vendita: a seconda della misura, confezione da 20, 40, 60 o 80 bende. <u>Stecche</u> : Unità d'uso e unità di vendita: in busta di plastica, contenuta in scatola in cartone/dispenser. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
<b>AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE</b>	Il prodotto deve essere conservato all'asciutto e ad una temperatura inferiore a 30°C. La vita utile del prodotto correttamente conservato è di tre anni.
<b>SMALTIMENTO</b>	Combustione controllata o interrimento secondo le direttive ambientali locali.
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
<b>CODICE CND</b>	M03050201
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical SA - Vibraye-Francia e distribuito da BSN medical S.r.l. , Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

continua

# PLATRIX

## BENDA GESSATA A PRESA RAPIDA

continuazione/2

<b>CODICI</b>	<b>NUOVI CODICI</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONFEZIONE PRIMARIA (multiplo d'ordine)</b>	<b>CONFEZIONE SECONDARIA (multiplo d'ordine e di imballo)</b>
48615206	71996-00001-00	6cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
48615208	71996-00023-00	8cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
6151050	71996-00004-00	10cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615212	71996-00000-00	12cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
6151100	71996-00005-00	15cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
6151150	71996-00006-00	20cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
48615306	71996-00024-00	6cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615308	71996-00025-00	8cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
6152050	71996-00010-00	10cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615312	71996-00002-00	12cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
6152100	71996-00012-00	15cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
6152150	71996-00014-00	20cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
48615406	71996-00029-00	6cmx4m	2 rotoli in busta di plastica	80 bende	80 bende
48615408	71996-00030-00	8cm x 4m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615410	71996-00026-00	10cmx4m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615412	71996-00027-00	12cmx4m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615415	71996-00003-00	15cmx4m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615420	71996-00028-00	20cmx4m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
48615510	71997-00000-00	stecca - 4 strati 10cmx20m	1 stecca	1 stecca	1 stecca
48615512	71997-00001-00	stecca - 4 strati 12cmx20m	1 stecca	1 stecca	1 stecca
48615515	71997-00002-00	stecca - 4 strati 15cmx20m	1 stecca	1 stecca	1 stecca
48615520	71997-00003-00	stecca - 4 strati 20cmx20m	1 stecca	1 stecca	1 stecca