




1. Codice	364815		
2. Descrizione	 <p>Holder BD Vacutainer®</p> <p>Camicia / Portaprovetta monouso per l'accesso venoso periferico - LATEX FREE</p>		
3. Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Polipropilene 		
4. Fabbricazione	<ul style="list-style-type: none"> Becton Dickinson and Company- Franklin Lakes, NJ (USA) certificazione: ISO 13485:2003 (NSAI n°MD19.2137) Ente certificatore: NSAI (0050) Rappresentante Europeo autorizzato: Becton Dickinson and Company – Belliver Industrial Estate, Plymouth (UK) 		
5. Conformità	<ul style="list-style-type: none"> Classificazione: Dispositivo Medico non sterile Classe I (Dir. 93/42 CEE) 		
6. Indicazioni riportate	Corpo della camicia	Busta	Imballo
BD Vacutainer Systems Preameritcal Solutions Franklin Lakes e indirizzo, luogo di fabbricazione		✓	✓
Marchio depositato BD Vacutainer™	✓	✓	✓
Rappresentazione grafica della camicia		✓	✓
Codice prodotto		✓	✓
Quantità di camicie contenute		✓	✓
Marchio CE		✓	✓
Monouso (simbolo)	✓	✓	✓
Dicitura non riutilizzare	✓		
Data di produzione (mese, anno)		✓	✓
N° di lotto		✓	✓
Rappresentanza europea autorizzata BD, Plymouth (UK)		✓	✓
Avvertenza:		✓	
Codice a barre primario (UCC/EAN 128): identificativo di prodotto			✓
7. Avvertenza	<ul style="list-style-type: none"> QUESTA CAMICIA E' ESCLUSIVAMENTE MONOUSO. SMALTIRE IL DISPOSITIVO AL TERMINE DI CIASCUNA VENIPUNTURA. Tutti i campioni biologici e gli aghi usati per il prelievo di sangue devono essere trattati secondo le disposizioni e le procedure in vigore presso l'Ente di appartenenza. Richiedere l'assistenza di un medico in caso di esposizione a campioni biologici (ad esempio, a seguito di puntura accidentale), in quanto possono rappresentare una potenziale fonte di epatite virale, HIV (AIDS) o altre malattie infettive. 		
8. Confezionamento	<ul style="list-style-type: none"> Confezione da 250 camicie Unità di vendita: Imballo da 250 x 4 camicie 		

9. Raccomandazioni d'utilizzo:	
• Destinazione d'uso	⇒ Prelievo venoso sottovuoto
• Raccomandazioni per il prelievo:	⇒ Il braccio del paziente deve essere inclinato verso il basso ⇒ Il punto della venipuntura deve essere disinfettato ⇒ Il laccio emostatico non deve essere applicato per più di 3 minuti ⇒ Omogeneizzare delicatamente il campione per inversione (5 volte) ⇒ Smaltire il dispositivo al termine di ciascuna venipuntura in un contenitore per taglienti senza rimuovere l'ago
10. Safety Material Data Sheet	Non applicabile
11. Codifica CND	A018099
12. Numero di repertorio (RDM)	91803/R